

RADIO-WAVE MESOTHERAPY

HX-V7

APARAT ZA RADIO-TALASNU MEZOTERAPIJU (BEZ IGALA)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Aparat za radio-talasnu mezoterapiju (bez igala)

UVOD

Aparat **RADIO-WAVE MESOTHERAPY** je mikroprocesorski kontrolisan aparat za mezoterapiju lica i tela. Koristi se za profesionalnu upotrebu u kozmetičkim salonima.

Kvalitet **RADIO-WAVE MESOTHERAPY** aparata potvrđen je garantnim rokom od **40 meseci** za verziju aparata **Standard**, odnosno **60 meseci** za verziju aparata **Premium**.

APARAT HX-V7

OPIS APARATA

Komplet **HX-V7** se sastoji od

- Aparata za mezoterapiju (u daljem tekstu *aparat*)
- Radio-talasnih glava (u daljem tekstu *radio-talasna glava*)

Na zadnjoj strani aparata se nalazi

- Prekidač za mrežno napajanje **ON/OFF**
- Kabl mrežnog napajanja

Na prednjoj strani aparata se nalazi

- *Soft-touch* taster za početak/završetak rada **START/STOP**
- *Soft-touch* taster za podešavanje vremena **TIME**
- Displej vremena tretmana (u **min**)
- Preklopnik za brzinu unosa **SPEED (LOW i FAST)**
- 2 LED diode brzine unosa
- Utičnica radio-talasne glave

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Priključiti kabl mrežnog napajanja u 220 V utičnicu, odnosno kabl radio-talasne glave u odgovarajuću utičnicu na prednjoj strani aparata.

Pritiskom na prekidač **ON/OFF** na zadnjoj strani, uključiti aparat.

Preklopnikom za brzinu unosa **SPEED**, izabrati željenu brzinu unosa preparata (**LOW** ili **FAST**).

Soft-touch tasterom **TIME**, podesiti željeno vreme trajanja tretmana (displej pokazuje vreme u **minutima**).

Pritiskom na *soft-touch* taster **START/STOP**, počinje proces mezoterapije. (**Napomena:** *Soft-touch* taster **START/STOP** je potrebno držati pritisnutim oko 2-3 sekunde, dok se ne pojavi zvučni signal).

Nakon isteka vremena tretmana, aparat (radio-talasna glava) se automatski isključuje. Pritiskom na prekidač **ON/OFF** na zadnjoj strani, isključiti aparat. Za sledeći tretman, ponoviti prethodno opisan postupak.

Tretman se u bilo kom trenutku može prekinuti pritiskom na *soft-touch* taster **START/STOP**.

Aparat za radio-talasnu mezoterapiju (bez igala)

RADIO-TALASNE GLAVE

Aparat **RADIO-WAVE MESOTHERAPY HX-V7** ima mogućnost korišćenja 2 radio-talasne glave (manje površine za lice, odnosno veće površine za telo).

INDIKACIJE

Aparat **RADIO-WAVE MESOTHERAPY HX-V7** ima širok spektar primene u kozmetologiji. Neke od osnovnih indikacija su:

- Uklanjanje celulita i masnih naslaga
- Eliminisanje strija
- Učvršćivanje i zatezanje tkiva
- Podmlađivanje lica
- Lečenje hiperpigmentacije
- Tamni kolutovi oko očiju
- Podočnjaci-kesice, bore, podbradak
- Promene nastale starenjem
- Promena svežine i jedrine kože lica

UPOZORENJA

- Aparat koristiti samo za namene navedene u uputstvu
- Nakon korišćenja, aparat isključiti iz mrežnog napajanja
- Za vreme čišćenja, aparat isključiti iz mrežnog napajanja
- Ne stavljati aparat na metalne površine i električne aparate
- Ne dopustiti kontakt aparata sa vodom i drugim tečnostima
- Ne ostavljati aparat bez nadzora dok je u operativnoj upotrebi
- Ne ostavljati aparat bez nadzora u blizini dece
- Ne koristite aparat ukoliko ima bilo koji oštećeni deo
- Ne skladištiti aparat na direktnom sunčevom svetlu, visokoj temperaturi ili vlazi
- Ne modifikovati i ne menjati neovlašćeno komponente aparata

UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE

- Aparat brisati isključivo suvom krpom, bez upotrebe sredstava za čišćenje
- Nakon svake upotrebe, radio-talasnu glavu obrisati krpom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	HX-V7
Napon napajanja	220 V, 50-60 Hz
Električna potrošnja	10 W
Podešavanje vremena	Da
Podešavanje brzine unosa	Da
Broj radio-talasnih glava	2
Dimenzija (cm)	45 x 45 x 20
Težina kompleta (kg)	2

Aparat za radio-talasnu mezoterapiju (bez igala)

GARANTNI LIST

Marka aparata: **HAROX**

Naziv aparata: **RADIO-WAVE MESOTHERAPY**

Model aparata: **HX-V7**

Verzija aparata: **Standard / Premium**

Serijski broj:

Datum prodaje:

GARANTNA IZJAVA

- Isporučilac garantuje da će aparat ispravno funkcionisati, ukoliko se pravilno upotrebljava i održava prema uputstvu.
- Garantni rok iznosi **40 meseci** za verziju aparata **Standard**, odnosno **60 meseci** za verziju aparata **Premium** računajući od datuma kupovine.
- Garancija je važeća ukoliko je ispravno popunjena i overena datumom prodaje, serijskim brojem aparata, pečatom i potpisom prodavca.
- Isporučilac se obavezuje da će u garantnom roku otkloniti sve nedostatke koji eventualno nastanu kod pravilne upotrebe aparata u najkraćem mogućem roku, a najkasnije za 60 dana (u toku popravke aparata garantni rok se produžava za taj period). Ukoliko isporučilac u garantnom roku ne otkloni eventualne funkcionalne nedostatke, obavezuje se da aparat zameni novim istog modela.
- Isporučilac se obavezuje da obezbedi rezervne delove najmanje 1 godinu nakon isteka garantnog roka.
- Garancija ne pokriva oštećenja uzrokovana nestručnim rukovanjem (npr. ukoliko se pažljivo ne pročita uputstvo), oštećenja nastala tokom transporta do kupca, mehanička oštećenja, oštećenja prouzrokovana elementarnim nepogodama, ekstremnim temperaturama, uticajem vlage i hemikalija, oštećenja usled nestanka ili dolaska mrežnog napona dok je aparat uključen, kao i ukoliko aparat otvaraju, popravljaju ili prepravljaju neovlašćena lica.
- Garancija ne pokriva potrošne delove aparata (trake, prostirke, sunđere, glave, pincete, elektrode, kablove sa pripadajućim džekovima i štipaljkama i dr). Garancija nije važeća u slučaju nenamernog ili namernog kratkospajanja elektroda (ili štipaljki) dok je aparat uključen.
- Garancija ne važi (i proizvođač ne snosi odgovornost) za korišćenje aparata u svrhe izvan njegove namene. Proizvođač nije odgovoran za direktan ili indirektan gubitak ili štetu koju bi korišćenje aparata moglo da izazove, čak i kada kvar podleže garanciji.
- Za sve informacije i reklamacije molimo Vas da se obratite ovlašćenom serviseru.

Ovlašćeni servis:

065/227-15-15

Potpis i pečat prodavca